


UVCARE®

UV-C Test Kit

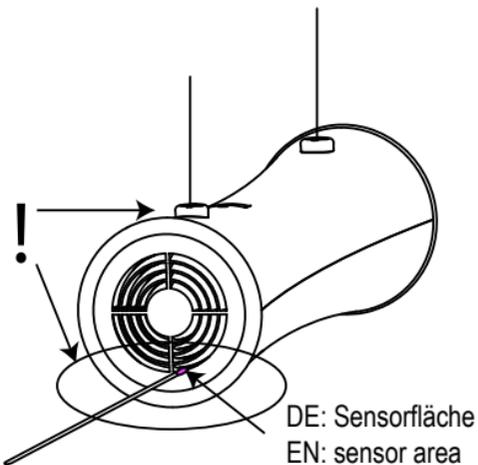


DE: In äußersten Schlitz gegenüber der Aufhängung einführen
EN: Insert into outermost slot opposite suspension


DE: Dieser Test dient zur Überprüfung der Leistung der UV-C Röhre, um frühzeitig einen Austausch durchführen zu können.
EN: This test is used to check the performance of the UV-C tube in order to be able to carry out a replacement at an early stage.

Set beinhaltet:
1 x Teststab mit Sensorfläche
1 x Dosimeter-Farbkarte

Contains:
1 x Test rod with sensor area
1 x Dosimeter colour card

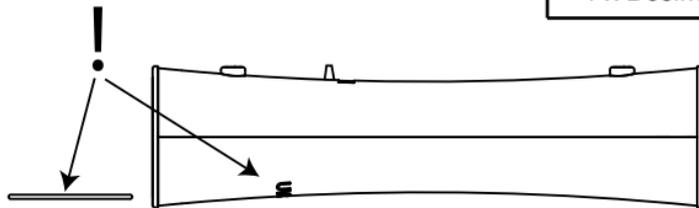

DE: ACHTUNG! Den Teststab an der Unterseite einführen.
EN: ATTENTION! Insert the test rod at the bottom.

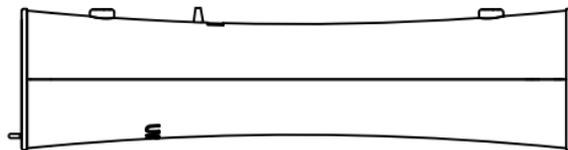

DE: Den Teststab bis zur Markierung einführen und 5 Sekunden warten
EN: Insert the test stick up to the mark and wait 5 seconds

DE: Test mit Dosimeter-Farbkarte vergleichen
EN: Compare test with dosimeter color card



> 75 mJ/m² ✓

< 75 mJ/m² ✗
DE: Röhre tauschen
EN: change tube

DE: ACHTUNG! Bei Einführung an falscher Seite kann das Gerät Schaden nehmen.
EN: ATTENTION! If inserted on the wrong side, the unit may be damaged.